

MODE D'EMPLOI


Fourni par le fabricant Balaban

Ces masques en tissu, 100% coton lavable, dits « grand public », répondent aux normes de l'AFNOR. Ce sont des masques de protection collective, d'une capacité de filtration de 70 à 80 % pour des particules de 3 microns. Ils permettent de prévenir les projections de gouttelettes.

ENTRETIEN ET UTILISATION



Laver avant première utilisation et après chaque utilisation, de préférence en machine à 60° (30 min. minimum) puis repasser.

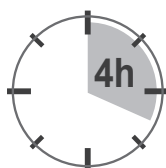

Limiter l'usage du masque à 1 seule et même personne, durant 4 heures et dans la limite de 10 utilisations maximum.



Se laver les mains avant de mettre le masque.



Mettre et ôter le masque par les élastiques sans toucher le masque.



Éviter de placer les doigts sur ou sous le masque.



Après utilisation, isoler votre masque dans un sac plastique avant de le laver.

MASQUE ET GESTES BARRIÈRES

Le masque doit s'accompagner du suivi strict :

- des gestes barrières (se laver les mains, éviter de se toucher le visage, tousser dans son coude, rester chez soi autant que possible)
- et des mesures de distanciation sociale (1m/1,5m entre chaque personne)